

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## MASECZKI MEDYCZNE

## CHARAKTERYSTYKA

**MASECZKI MEDYCZNE** są niesterylnym wyrobem medycznym przeznaczonym do ochrony dróg oddechowych (nos, usta).

**Wyrób składa się z:**

- Części ochronnej i filtrującej wykonanej z polipropylenu;
- Noska umożliwiającego dokładne dopasowanie maseczki do kształtu twarzy;
- Gumki do mocowania maseczki przy uszach.

## WSKAZANIA

Wyrób przeznaczony jest do stosowania jako ochrona dróg oddechowych przed zakażeniami roznoszonymi drogą kropelkową, w czasie wzmożonych zachorowań na ww. infekcje oraz do standardowo wykonywanych procedur medycznych, wymagających ochrony dróg oddechowych, np. zabiegi stomatologiczne.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie ma informacji odnośnie uczulającego działania wyrobu, jednak należy zachować ostrożność w przypadku uczulenia na polipropylen.

## SPOSÓB UŻYCIA

Maseczki pakowane w opakowania po 3, 10, 20, 30,50 szt. Aby użyć wyrób należy:

1. Otworzyć opakowanie w wyznaczonym miejscu;
2. Wyjąć 1 szt. wyrobu;
3. Założyć gumki na uszy;
4. Dopasować maseczkę tak by osłaniała usta oraz nos;
5. Dopasować wbudowany w górnej części drucik, tak aby maseczka dobrze przylegała do nosa.

## UWAGI

1. Wyrób w stanie niejałowym.
2. Należy zachować ostrożność podczas otwierania opakowania aby nie zanieczyścić pozostałych maseczek.
3. Maseczka przeznaczona jest tylko do jednorazowego użytku.
4. Nie stosować po upływie daty ważności.
5. Nie stosować, gdy opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
6. Zmieniać maseczkę przynajmniej raz na godzinę lub do każdej procedury medycznej.

## DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono żadnych komplikacji podczas używania maseczek.











W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników należy zaprzestać stosowania, a w razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania maseczek medycznych powinny spełniać następujące wymagania:

1. Nie wystawiać na działanie UV i promieni słonecznych;
2. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 45°C;
3. Zakres wilgotności 25 – 65%;
4. Przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem i uszkodzeniem chemicznym lub mechanicznym.

## SYMBOLE UŻYTE NA OPAKOWANIU

	WYRÓB NIEJAŁOWY
	TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 5°C – 45°C
	PRZECHOWYWAĆ W WARUNKACH ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED ZAMOCZENIEM
	ZAKRES WILGOTNOŚCI 25-65%
	NIE UŻYWAĆ POWTÓRNIE
	CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM SŁONECZNYM
	NIE UŻYWAĆ KIEDY OPAKOWANIE JEST USZKODZONE
	WYPRODUKOWANO PRZEZ
	ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA
	UŻYĆ PRZED
	CERTYFIKAT
	RODZAJ OPAKOWANIA
	NIE ZAWIERA LATEKSU