



LAMPA VRN VAFU INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przełączanie trybu pracy

Lampa Vafu oferuje użytkownikom 3 tryby pracy: stały, pulsacyjny i narastający.

Przełączanie trybów pracy odbywa się w następujący sposób:

Nacisnąć przycisk "Δ" i przytrzymać około 1 sekundy, zwolnić po jednym sygnale dźwiękowym, tryb pracy został przełączony na następny.

Kolejność jest następująca: Tryb stały

Tryb narastający

Tryb pulsacyjny.

Instrukcje dotyczące trybów pracy:

TRYB	OPIS	OZNACZENIE
Tryb stały	stała moc wyjściowa światła	
Tryb narastający	natężenie światła stopniowo wzrasta i po 5s osiąga stałą wartość pełnej mocy	
Tryb pulsacyjny	Wyjście światła w trybie pulsacyjnym	
PRACA CYKLICZNA	Użytkownik ustawia czas pracy, po zakończeniu cyklu zatrzymuje się na kilka sekund, a następnie powtarza poprzednie ustawienie czasu pracy i kontynuuje pracę wielokrotnie w ten sposób. Różny czas pracy i różny poziom mocy, przedziały czasowe są różne, patrz tabela poniżej.	

Odstępy czasowe w różnych poziomach mocy i czasach pracy:

POZIOM	CZAS PRACY	1S	2S	3S	4S	5S	10S	15S	20S	25S	30S	35S	40S
P1		3*	3*	4*	/	/	/	/	/	/	/	/	/
P2		3*	3*	3*	3*	3*	4*	5*	6*	/	/	/	/
P3		3*	3*	3*	3*	3*	4*	4*	5*	5*	6*	6*	7*

* Odstęp w sekundach wymagany do ponownego użycia lampy

Przełączania poziomu mocy

Dostępne są 2 poziomy mocy pracy urządzenia, w zależności od potrzeby możemy przełączyć je na odpowiedni zakres:

P1 – najwyższy poziom mocy 2300mW/cm² - 2500 mW/cm²

P2 – umiarkowany poziom mocy 1600mW/cm² - 1800 mW/cm²

P3 – niski poziom mocy 1000mW/cm² - 1200 mW/cm²

Nacisnąć przycisk "Δ" na około 2 sekundy, zwolnić po dwóch sygnałach dźwiękowych, poziom mocy został przełączony na następny. Kolejność jest następująca: P3 - P2 - P1 - P3....

Funkcja wykrywania próchnicy

W celu wykorzystania funkcji wykrywania próchnicy należy wymienić główkę lampy na wykrywacz próchnicy. Miejsca na zębie z istniejącą próchnicą będą przebarwiały się, efekt widoczny wyłącznie z zastosowaniem dołączonych okularów

Nakładki na lampę do stosowania przy utwardzeniach trudno dostępnych powierzchni.

Lampa Vafu umożliwia naświetlanie kompozytów zastosowanych w trudno dostępnych przestrzeniach. Służą do tego soczewki skupiające światło, występujące w 4 rodzajach:

	Do punktowego utwardzania małych kompozytów lub lepkiego utwardzania licówek.
---	--

	Do utwardzania wypukłych uzupełnień na powierzchniach proksymalnych
	Do zabiegów endodontycznych, w tym retrofillacji wierzchołka i innych przypadków, w których wymagany jest wąski światłowód.