



Instrukcja obsługi lampy VRN 200

1. **Akumulator lampy zabezpieczony jest papierową wkładką**, przed przystąpieniem do pracy należy ją usunąć. W tym celu odkręcamy dolną część lampy (w prawą stronę) i wyciągamy zabezpieczenie
2. Zdejmij czerwoną osłonkę ze światłowodu, włóż metalową końcówkę światłowodu do lampy, końcówka powinna być dociśnięta do samego końca
3. Załóż plastikową osłonę na światłowód

Włączenie lampy

Lampę włączamy lub wyłączamy przyciskając przycisk P

Tryby pracy

1. Lampa posiada 3 tryby pracy. Zmiana trybu pracy następuje poprzez przyciśnięcie przycisku M
2. 01 – tryb ciągły, lampa świeci pełną mocą (tryb rekomendowany)
3. 02 – tryb narastający natężenie światła rośnie, po 5s osiąga moc maksymalną
4. 03 – tryb pulsacyjny – światło pulsuje

Ograniczenie intensywności natężenia światła

1. Naciskaj przycisk M do moment pojawienia się programu 04 na wyświetlaczu, następnie naciskając przycisk T wybierz tryb P01, P02, lub P03. Wybierając P01 lampa świeci na 100% mocy, P02 – 75% a P03 – 50%.

Po wyborze odpowiedniej opcji zatwierdź wybór przyciskiem M

Czas pracy

1. Czas pracy nastawiamy poprzez naciśnięcie przycisku T, możemy wybrać jeden z następujących trybów: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 lub 40s
2. Rozpoczęcie pracy jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Pracę możemy przerwać w dowolnym momencie przyciskając przycisk P
3. Jeśli akumulator będzie na granicy rozładowania wyświetlacz zacznie mrugać.
4. Akumulator nie ma efektu pamięci, może być doładowywany niezależnie od stopnia rozładowania

Przed pierwszym użyciem należy ładować lampę przez co najmniej 4 godziny.